

ProCare

Med 30 C

Neutralisatiemiddel op basis van organisch zuur

Gebruiksaanwijzingen

Toepassing

ProCare Med 30 C is een neutralisatiemiddel(zuur) voor was- en desinfectieapparaten na een mild alkalische geautomatiseerde reiniging van herbruikbare thermostabiele en thermoleerbare, invasieve en niet-invasieve medische hulpmiddelen zoals chirurgische, microchirurgische en instrumenten voor minimaal invasieve chirurgie, rigide endoscopen, anesthesie- en beademingsapparatuur, ziekenhuisbenodigdheden, aluminium sterilisatiecontainers en andere medische apparatuur.

Eigenschappen

ProCare Med 30 C is een mild neutralisatiemiddel(zuur) met de volgende eigenschappen:

- Verwijdert voorzichtig alkalische resten van verwerkte voorwerpen
- Kan de levensduur van instrumenten verlengen door vlekken op voorwerpen te voorkomen die zijn bereid met alkalische reinigingsmiddelen, deze vlekken kunnen later in de verwerkingscyclus onherstelbare schade aan de materialen veroorzaken, bijv. tijdens sterilisatie.
- Geschikt voor anesthesiemateriaal
- Compatibel met aluminium
- Vrij van oppervlakte-actieve stoffen
- Fosfaatvrij

Materiaalcompatibiliteit

Geschikt voor RVS, (geanodiseerd) aluminium, kunststoffen, rubber, glas en keramiek. Neem voor materialen die hierboven niet zijn genoemd contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om te bepalen of het materiaal geschikt is.

Dosering en toepassing

De optimale dosering is vooral afhankelijk van de hoeveelheid alkalische resten. Zorg voorafgaand aan de neutralisatie voor een volledige afvoer van de wasvloeistof.

In de praktijk geeft een neutralisatiefase met een dosering van 1 tot 3 ml/L goede resultaten met minimaal 1 minuut na reiniging met alkalische reinigingsmiddelen, zoals ProCare Med 10 MA. Zie de gebruiksaanwijzing van ProCare Med 10 MA voor meer informatie. Zorg voor een goede tussentijdse spoeling na de neutralisatiefase met ProCare Med 30 C gedurende minimaal 1 minuut om ervoor te zorgen dat er geen sporen achterblijven op de verwerkte voorwerpen en om corrosie te voorkomen.

Voor was- en desinfectieapparaten van Miele en Steelco wordt er specifieke informatie over de volledige programmacyclus gegeven voor verschillende medische disciplines in hun betreffende gebruiksaanwijzingen.

Houd rekening met het volgende!

Niet mengen met andere producten! • Bel de service van Miele/Steelco als u van product wisselt. • De verwerking moet voldoen aan alle verordeningen conform de voorschriften voor medische hulpmiddelen en dient middels geschikte, gevalideerde processen te worden uitgevoerd. • In overeenstemming met nationale richtlijnen en/of EN ISO 15883 is een prestatiekwalificatie vereist. • Volg de aanbevelingen voor herverwerking die zijn uitgegeven door fabrikanten van instrumenten met betrekking tot de bepalingen van ISO 17664. • Neem de gebruiksaanwijzingen van Miele/Steelco was- en desinfectieapparaten in acht. • Voor gebruik in andere was- en desinfectieapparaten dan die van Miele/Steelco, raadpleeg de fabrikant van de was- en desinfectieapparaten en de betreffende gebruiksaanwijzing.

ProCare

Med 30 C

Neutralisatiemiddel op basis van organisch zuur

Technische gegevens

Dichtheid (concentraat): 1,2 g/mL

pH-waarde (1 % oplossing in gedemineraliseerd water): ca. 2,6

Uiterlijk (concentraat): transparant, kleurloos

Ingrediënten

Organisch zuur

Transport en opslag

Bewaar het product bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.

Informatie over verwijdering en recycling

Reservoirs, schroefdoppen en labels zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Voor het afvoeren van gebruikte reservoirs, inclusief die met restproduct en verwerkte oplossing, dienen de lokale afval- en afvalwatervoorschriften in acht te worden genomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het afvoeren van ongebruikt product.

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over arbeidsveiligheid.

CE-markering

ProCare Med 30 C voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen volgens de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige reservoirformaten.

Contactgegevens**Duitsland**

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Nederland

Miele Nederland B.V.
De Limiet 2
4131 NR VIANEN
Tel.+31 347 378-884
Fax+31 347 378-429
professional@miele.nl
serviceprofessional@miele.nl
www.miele.nl/professional

Italië

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

België

N.V. MIELE S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 MOLLEM
Tel. +32 2 4511-540
Fax +32 2 4511-414
professional@miele.be
www.miele.be/fr/professional
www.miele.be/nl/professional

Fabrikant**Zwitserland**

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch