

ProCare

Med 10 PRE

Detergente ecológico para utilização manual

Instruções de utilização

Aplicação

O ProCare Med 10 PRE é um detergente suave para o reprocessamento manual completo de dispositivos médicos reutilizáveis, termoestáveis, invasivos e não invasivos, tais como instrumentos e utensílios cirúrgicos, instrumentos MIS, endoscópios rígidos, equipamento anestésico, etc.

Também é adequado para a imersão de instrumentos antes do processamento automático, reduzindo assim o risco de corrosão dos instrumentos e de secagem de superfícies sujas.

O ProCare Med 10 PRE também é adequado para utilização em banhos ultrassónicos.

Propriedades

Com uma mistura ideal de tensoativos, o ProCare Med 10 PRE oferece as seguintes propriedades:

- pH-neutro
- Grande variedade de compatibilidade de materiais.
- Com base em NTA e fórmula isenta de fosfatos.
- Excelente biodegradabilidade.

Compatibilidade de materiais

Adequado para aço inoxidável, alumínio (anodizado), metais não ferrosos, PVC, borracha, materiais plásticos, cerâmica.

Para saber sobre materiais não mencionados acima, contacte o seu representante local para verificar se o material é adequado.

Dosagem e aplicação

Aplicação	Dosagem	Observações
Limpeza (pré-limpeza) manual de dispositivos médicos	0,5 – 1,0%	Imerja os instrumentos durante 2 – 15 min, se necessário escove-os. Utilize a solução apenas uma vez.
Limpeza ultrassónica	0,5 – 1,0%	Aprox. 5 min de sonicação.
Imersão dos instrumentos antes da limpeza automática	0,2 – 0,5%	Utilize a solução apenas uma vez.

Lave os instrumentos com água após a limpeza ou antes de os colocar na máquina de lavar e desinfetar.

Atenção!

Não misture com outros produtos! • Ligue para a assistência técnica da Miele/Steelco quando trocar de produtos. • O reprocessamento deve cumprir todos os decretos de acordo com os regulamentos dos dispositivos médicos e deve ser executado com processos apropriados e validados. • Siga as recomendações sobre reprocessamento emitidas pelos fabricantes de instrumentos, conforme exigido pela norma ISO 17664.

ProCare

Med 10 PRE

Detergente ecológico para utilização manual

Dados técnicos

Densidade (concentrado): 1.1 g/mL

Valor de pH (solução a 1% em água desmineralizada): aprox. 7.5

Aparência (concentrado): transparente, incolor a amarelo

Ingredientes

Tensioativos, agentes complexantes, inibidores de corrosão

Transporte e armazenamento

Transporte e armazene o produto a temperaturas entre 5 °C e 25 °C.

Este dispositivo médico é sensível a temperaturas frias. Se a temperatura ambiente do transporte for provavelmente inferior a 5 °C, este produto deve ser enviado através de camião com temperatura controlada/contentor marítimo com temperatura acima de 5 °C, ou com capas de proteção para transporte, sem que a temperatura desça abaixo dos 5 °C durante mais de 10 horas.

Informações sobre eliminação e reciclagem

Recipientes, tampas de rosca e rótulos são feitos de polietileno reciclável. Para eliminar recipientes usados, incluindo aqueles que tenham produtos residuais e solução processada, devem ser respeitadas as normas locais relativas ao lixo e às águas residuais.

Para a eliminação de produtos não utilizados, consulte a ficha de dados de segurança.

Informações sobre segurança

Para saber informações sobre segurança no trabalho, consulte a ficha de dados de segurança.

Marcação CE

O ProCare Med 10 PRE cumpre os requisitos para dispositivos médicos de acordo com o Regulamento dos Dispositivos Médicos (UE) 2017/745.

Disponibilidade

Consulte o seu representante local para obter informações sobre os tamanhos de recipientes atualmente disponíveis.

Dados de contacto

Alemanha

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Telefon +49 (0) 8002244644
vertrieb@miele-professional.de
www.miele.de/professional

Portugal

Miele Portuguesa Lda.
Av. do Forte, n°5
2790-073 CARNAXIDE
Tel. +351 21 4248-100
Fax +351 21 4248-109
professional@miele.pt
professionalservice@miele.pt
www.miele.pt/professional

Itália

Steelco S.p.A.
Via Balegante 27,
31039 Riese Pio X (TV)
Tel: +39 0423 7561
www.steelcogroup.com

Fabricante

Suíça

Borer Chemie AG
Gewerbstrasse 13
4528 Zuchwil
Tel +41 32 686 56 00
office@borer.ch
www.borer.ch