

# ProCare

Med 30 P

## Neutralisatiemiddel op basis van anorganisch zuur

### Gebruiksaanwijzingen

#### Toepassing

ProCare Med 30 P is een neutralisatiemiddel(zuur) voor was- en desinfectieapparaten na een alkalische geautomatiseerde reiniging van herbruikbare, invasieve en niet-invasieve, thermostabiele medische hulpmiddelen zoals chirurgische instrumenten en gebruiksvorwerpen.

#### Eigenschappen

ProCare Med 30 P is een neutralisatiemiddel(zuur) met de volgende eigenschappen:

- Verwijdert voorzichtig alkalische resten van verwerkte voorwerpen
- Kan de levensduur van instrumenten verlengen door vlekken op voorwerpen te voorkomen die zijn bereid met alkalische reinigingsmiddelen, deze vlekken kunnen later in de verwerkingscyclus onherstelbare schade aan de materialen kunnen veroorzaken, bijv. tijdens sterilisatie.
- Vrij van oppervlakte-actieve stoffen

#### Materiaalcompatibiliteit

Geschikt voor RVS, kunststoffen, glas en keramiek. Niet compatibel met (geanodiseerd) aluminium en zink.

Neem voor materialen die hierboven niet zijn genoemd contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger om te bepalen of het materiaal geschikt is.

#### Dosering en toepassing

De optimale dosering is vooral afhankelijk van de hoeveelheid alkalische resten. Zorg voorafgaand aan de neutralisatie voor een volledige afvoer van de wasvloeistof.

In de praktijk geeft een neutralisatiefase met een dosering van 1 tot 3 ml/L goede resultaten met minimaal 1 minuut na reiniging met ProCare Med 10 A. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van ProCare Med 10 A voor meer informatie.

Zorg voor een goede tussentijdse spoeling na de neutralisatiefase met ProCare Med 30 P gedurende minimaal 1 minuut om ervoor te zorgen dat er geen sporen achterblijven op de verwerkte voorwerpen en om corrosie te voorkomen.

Voor was- en desinfectieapparaten van Miele en Steelco wordt er specifieke informatie over de volledige programmacyclus gegeven voor verschillende medische disciplines in hun betreffende gebruiksaanwijzingen.

#### Houd rekening met het volgende!

Voor de herverwerking van anesthesiemateriaal en oogheelkundige instrumenten wordt het gebruik van ProCare Med 30 C aanbevolen. • Niet mengen met andere producten! • Bel de service van Miele/Steelco als u van product wisselt. • De verwerking moet voldoen aan alle verordeningen conform de voorschriften voor medische hulpmiddelen en dient middels geschikte, gevalideerde processen te worden uitgevoerd. • In overeenstemming met nationale richtlijnen en/of EN ISO 15883 is een prestatiekwalificatie vereist. • Volg de aanbevelingen voor herverwerking die zijn uitgegeven door fabrikanten van instrumenten met betrekking tot de bepalingen van ISO 17664. • Neem de gebruiksaanwijzingen van Miele/Steelco was- en desinfectieapparaten in acht. • Voor gebruik in andere was- en desinfectieapparaten dan die van Miele/Steelco, raadpleeg de fabrikant van de was- en desinfectieapparaten en de betreffende gebruiksaanwijzing.

# ProCare

**Med 30 P**

## Neutralisatiemiddel op basis van anorganisch zuur

### Technische gegevens

Dichtheid (concentraat): 1,1 g/mL

pH-waarde (1 % oplossing in gedemineraliseerd water): ca. 2,3

Uiterlijk (concentraat): transparant, kleurloos

### Ingrediënten

Anorganisch zuur

### Transport en opslag

Bewaars het product bij temperaturen tussen 5 °C en 25 °C.

### Informatie over verwijdering en recycling

Reservoirs, schroefdoppen en labels zijn gemaakt van recyclebaar polyethyleen. Voor het afvoeren van gebruikte reservoirs, inclusief die met restproduct en verwerkte oplossing, dienen de lokale afval- en afvalwatervoorschriften in acht te worden genomen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor het afvoeren van ongebruikt product.

### Veiligheidsinformatie

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor informatie over arbeidsveiligheid.

### CE-markering

ProCare Med 30 P voldoet aan de vereisten voor medische hulpmiddelen volgens de verordening voor medische hulpmiddelen (EU) 2017/745.

### Beschikbaarheid

Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de huidige reservoirformaten.

### Contactgegevens

#### Duitsland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional

#### Nederland

Miele Nederland B.V.  
De Limiet 2  
4131 NR VIANEN  
Tel.+31 347 378-884  
Fax+31 347 378-429  
professional@miele.nl  
serviceprofessional@miele.nl  
www.miele.nl/professional

#### Italië

Steelco S.p.A.  
Via Balegante 27,  
31039 Riese Pio X (TV)  
Tel: +39 0423 7561  
www.steelcogroup.com

#### België

N.V. MIELE S.A.  
Z.5 Mollem 480  
1730 MOLLEM  
Tel. +32 2 4511-540  
Fax +32 2 4511-414  
professional@miele.be  
www.miele.be/fr/professional  
www.miele.be/nl/professional

#### Fabrikant

##### Zwitserland

Borer Chemie AG  
Gewerbstrasse 13  
4528 Zuchwil  
Tel +41 32 686 56 00  
office@borer.ch  
www.borer.ch