

## ProCare

Med 10 BPA




### Reiniger

#### Verwendung:

Flüssigkonzentrat, alkalisch. Zur maschinellen Reinigung von Steckbecken und Urinflaschen in Miele Professional Steckbeckenspülnern.

#### Qualitätsmerkmal:

ProCare Med 10 BPA erfüllt die Vorgaben resultierend aus der Medizinproduktegesetzgebung. 

#### Produkteigenschaften:

- Schaumarme Einstellung
- Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen
- Bei allen Wasserhärten einsetzbar

ProCare Med 10 BPA ist nur für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.


#### Anwendung und Dosierung:

Der Reiniger ProCare Med 10 BPA und die Steckbeckenspüler PWD 8541, PWD 8545, PWD 8546, PWD 8549 sind perfekt aufeinander abgestimmt.

- Exakte und ökonomische Dosierung über eine Dosierpumpe
  - Anwendungskonzentration: 1 - 3 ml/l in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad
  - Kurz, Standard, Intensiv und Benutzerprogramme
- Die Anwendungslösung ist vollständig mit Wasser abzuspülen.

#### Programmablauf:

Am Beispiel des Standardprogrammes der PWD 8545.

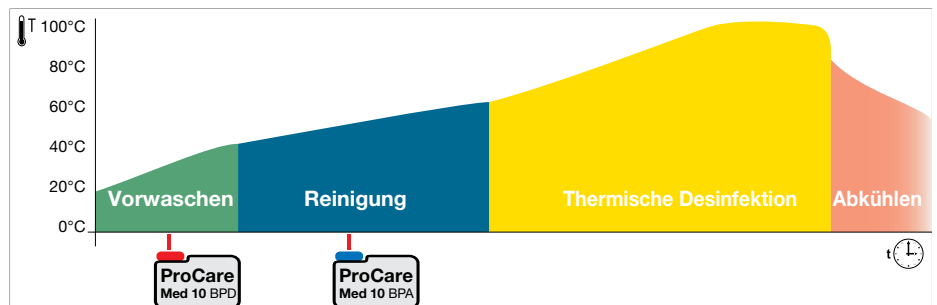

#### Bitte beachten!

- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Die Aufbereitung muss entsprechend der Empfehlung der KRINKO<sup>1</sup> und des BfArM<sup>2</sup> und der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mit geeigneten Verfahren durchgeführt werden.
- Bitte beachten Sie die Aufbereitungsempfehlungen des Medizinprodukte-Herstellers entsprechend den Anforderungen der DIN EN ISO 17664.
- Die Gebrauchsanweisungen der Miele Professional Steckbeckenspüler sind zu beachten.

<sup>1</sup>Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention und <sup>2</sup>Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.

## ProCare Med 10 BPA



### Reiniger


#### Technische Daten:

- Dichte (20 °C): ca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>
- pH-Wert (bestimmt in vollentsalztem Wasser, 20 °C) 1 - 3 ml/l: ca. 11,2 - 11,5

#### Inhaltsstoffe für Reinigungsmittel gemäß EG-Detergenzienverordnung 648/2004:

- < 5 % Phosphonate
- 15 - 30 % EDTA

#### Lagerhinweise:

- Einzuhaltende Lagertemperatur: 0 - 30°C
- Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre verwendbar
- Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol 

#### Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter den unten aufgeführten Miele Webseiten verfügbar.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verwender nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.

#### Lieferbare Verpackungseinheiten und Zubehör

Bezeichnung	Gebinde	Materialnummer
ProCare Med 10 BPA	5 l Kanister	11233310
Kanisterschlüssel	für 5 l	9066810

#### Kontaktdaten:

##### Deutschland

Miele & Cie. KG  
Carl-Miele-Straße 29,  
33332 Gütersloh  
Telefon +49 (0) 8002244644  
vertrieb@miele-professional.de  
www.miele.de/professional



##### Deutschland

Chemische Fabrik  
Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
www.drweigert.de